

Dr. med. Wolfhart König
Dr. med. Gertraud Maier

Fachärzte für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
Naturheilverfahren, Allergologie
Stimm- und Sprachstörung
Homöopathie und Akupunktur
Ambulantes Operieren
Belegärzte Paracelsus-Klinik

Thiebauthstr. 10
76275 Ettlingen
Tel. 07243-77899
Fax. 07243-38470
HNOPraxis@t-online.de
www.hno-ettlingen.de
27.03.2008

Erfahrungsbericht mit dem Radiosurg 2200 mit Abschaltautomatik

Wir arbeiten in unserer Praxis seit über einem Jahr mit dem Radiosurg 2200.

Seit neustem nutzen wir hierbei die Funktion der automatischen Abschaltung bei Eingriffen an den Nasenmuscheln.

Hierbei wird eine reproduzierbare Läsion gesetzt, die im Voraus festgelegt werden kann.

Dies erleichtert den Eingriff gegenüber dem Vormodell, da hier nach Erfahrungswerten gearbeitet werden musste.

Die Einstellbarkeit der Abschaltautomatik bietet den Vorteil, auf verschiedene anatomische Ausprägungen der Nasenmuscheln adäquat reagieren zu können.

Wir verwenden standardmäßig die Intensitätseinstellung 16, Koagulationsgrad c2. Bei ausgeprägtem Schleimhautüberschuß reduzieren wir die Leistung auf 10-12, um durch längere Einwirkzeit eine ausgedehntere Läsion zu setzen.

Die Applikation der Radiofrequenz erfolgt mit doppeltgenadelten Elektrode, standardmäßig im unteren horizontalen Bauch der unteren Nasenmuschel sowie im lateralen Schleimhautblatt. Die oberen Anteile der Muschel bedürfen nur in Einzelfällen einer Versorgung.

Nur in Einzelfällen kommt es im Anschluß an den Eingriff zu einer ein- bis zweitägigen Nasenmuschelanschwellung mit Bildung von serösem Sekret oder, mit einer Latenz von 2-3 Tagen, zu einer passageren Borkenbildung.

Wir sind mit der Radiofrequenzmethode und ihrer Anwendung sehr zufrieden.
Die Patienten verspüren prompte Besserung und die eigene Arbeit wird deutlich erleichtert und beschleunigt.

Mit der jetzt angewandten Abschaltautomatik steigt die Benutzerfreundlichkeit noch weiter an. Darüber hinaus wird durch die Steuerbarkeit ein wesentlicher Beitrag zur Qualitätssteigerung erreicht.

Dr. med. W. König

52 13 382
Gemeinschaftspraxis
Dr. med. Wolfhart König
Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
Dr. med. Gertraud Maier
Fachärztin für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
Allergologie, Stimm- und Sprachstörungen
Naturheilverfahren, Homöopathie
Thiebauthstr. 10, 76275 Ettlingen
Tel. 0 72 43 / 7 78 99, Fax 3 84 70